
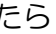


超音波検査マニュアル (Aplio300)

2016.12.01 作成
2019.04.08 改訂
2022.12.12 改訂なし

1. **POWER** ボタン () を押して電源をつける。
2. 装置が立ち上がったら **NEW Patient** ボタン () を押して、検査準備画面にする。



3. トラックボールで **Get Worklist** にカーソルを合わせて **SET** ボタンを押し、オーダーを引く。




4. **ID** にカーソルを合わせて、バインダーの中の検査用バーコードを読ませ、**Search** にカーソルを合わせて **SET** ボタンを押す。



5. 患者情報(ID、Name、Exam Type)を確認して、画面上方に表示された中から検査項目を選択しトラックボールでカーソルを合わせてSETボタンを押す。

Startにカーソルを合わせてSETボタンを押す。

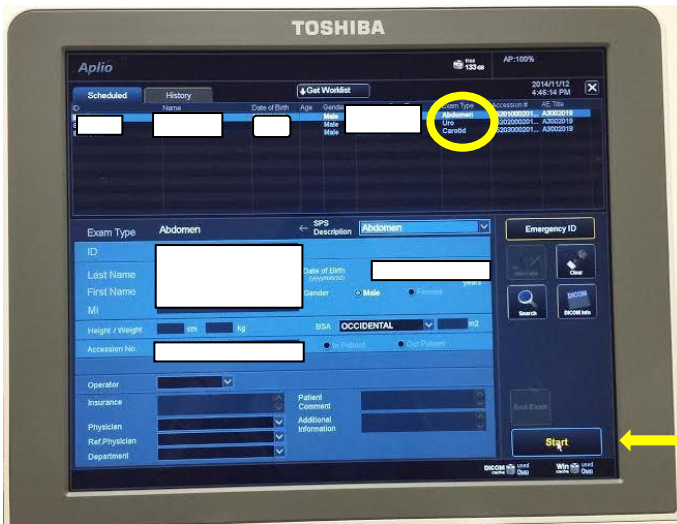

6. BモードでGAINやSTCを調整し、画像を保存する。

静止画→FRZボタンを押して画像を静止させてから静止画保存ボタンを押す。

画像はサーバーに自動送信される。



7. 検査終了後、NEW Patientボタンを押して検査開始画面に戻す。

8. POWERボタンを押し、トラックボールでカーソルをShutdownに合わせてSETボタンを押す。

