

超音波検査 資材セッティング概要

① 超音波の周辺資材、備品は青BOXにランダムで入っています。



枕、記録紙、クリップ等



乳腺エコー実施時の胸にかけるタオル



スタンドライト



ゼリー、ウォーマー、記入後所見用紙を入れる封筒

② 必要備品を各自青 BOX から探しセッティングをお願いします。



ベッドにはシーツはひきません。適宜アルコールで消毒等をお願いいたします。



据え置き型機器のセッティングイメージ



ポータブル型機器のセッティングイメージ



図のようにSTCがずれているときがあります。

「真ん中に真っすぐ」をお願いいたします。

健診終了後に撤去作業がある場合

- ① 備品はすべて青 BOX に収まるように片付けてください。
- ② 機器の電源を落とします。



備え付けのウォーマーがある場合は電源 OFF



機器の後ろ下方にある電源 OFF

- ③ 機器からプローブを外しプローブケースへ格納してください。

④ コンセントを抜き、運べるように片付けます。



電源コードは後ろに丸めて落ちないようにかけてください。



養生用の布をかぶせます。

※ポータブル機器については、機器 BOX の中にセッティング方法が入っていますので、

そちらを見てください。