



# タブレット起動～検査実施、データ保存


## <タブレット起動～設定>

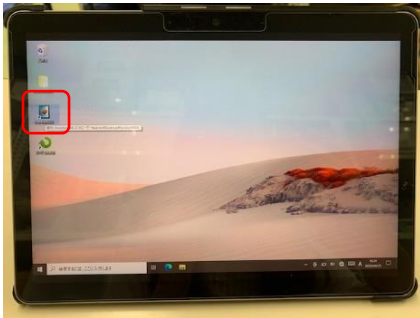


①kenshinNKK を選ぶ

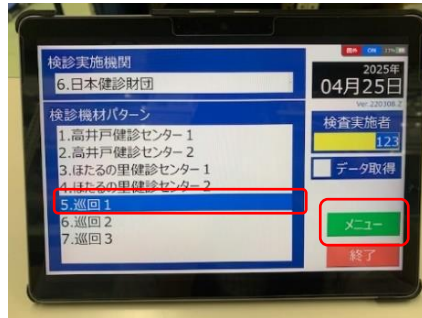


②5.巡回1 を選びメニューへ  
※検査実施者の欄は変更しないこと

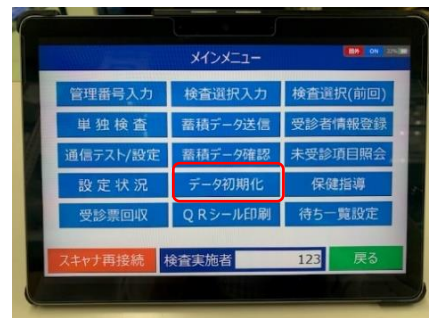


③データ初期化

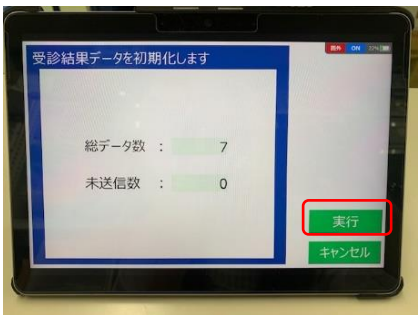


④実行を選択

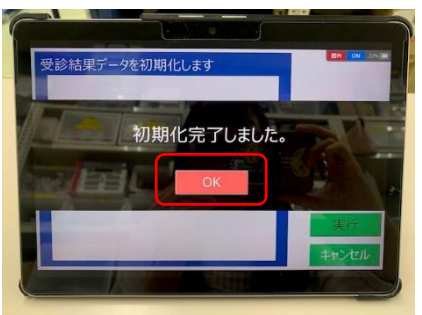


⑤OK を押す

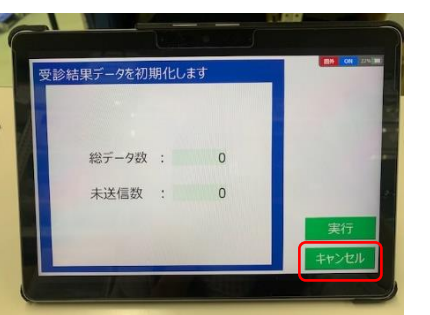


⑥キャンセルでメニューへ戻る

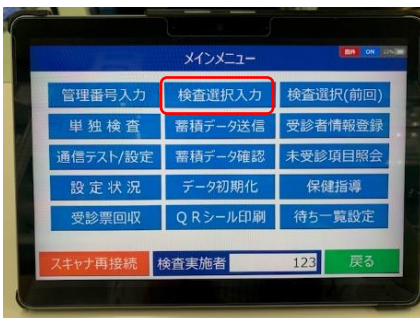

⑦検査選択入力を選ぶ

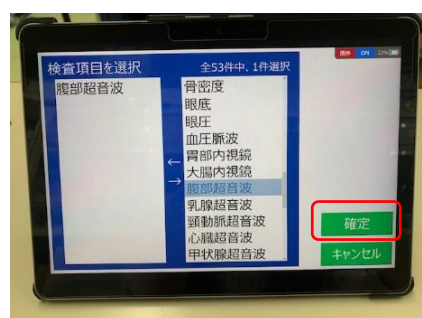

⑧右枠から検査を選択し左に移すし確定  
※選び間違えたら左側の欄をタップ  
すると右欄へ戻ります

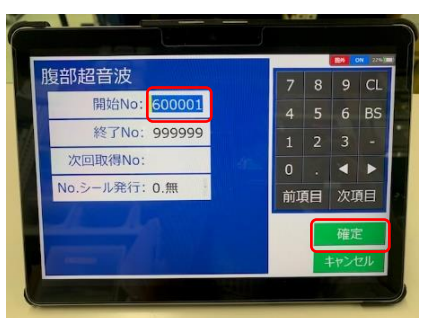


⑨開始 No.に 600001 が入っている  
ことを確認し確定を押す





⑩次回取得 No.にも 600001 が  
入っていることを確認し確定を押す



⑪登録を押す

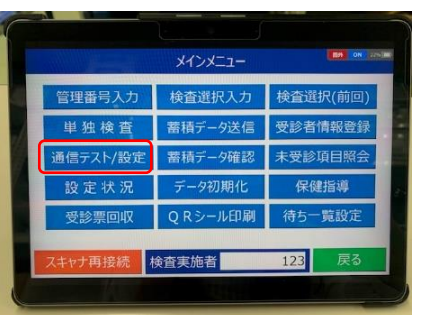

⑫メニューから通信テストを選択

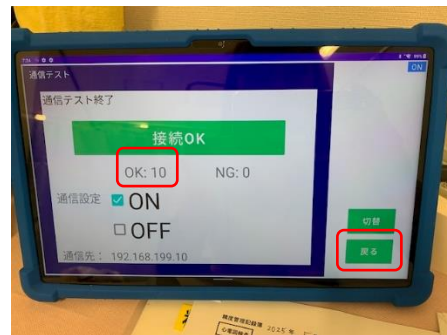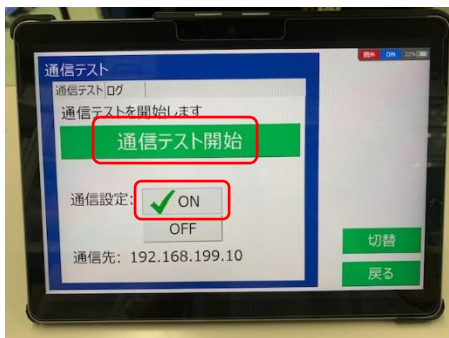


⑬班長から通信 OK ですよと言われたら、  
通信設定を ON にし、通信テスト開始をタップする


⑭OK:10 になったことを確認出来たら戻るで  
メニューへ戻る

※NG が出る場合は班長もしくは職員へ知らせて  
ください

<始業点検～受診者登録、機器転送>

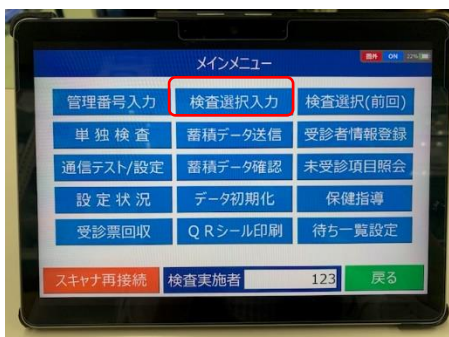

①検査選択入力を選ぶ

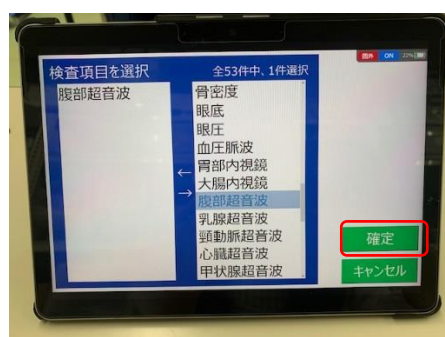

②腹部超音波を選択し、確定



③↑この画面の状態です QR を読み取り



④登録を選択

※腹部超音波 No.は変えないこと




⑤もう一度登録




⑥「はい」を選択

----- ここまでは GE・Viamo 共通 -----


<受診者情報取得 (GE) >

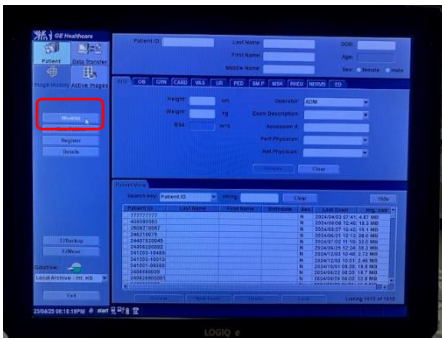

①Worklist を選択

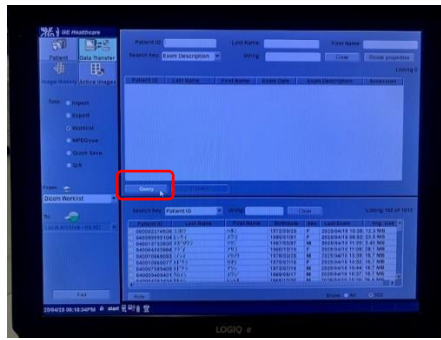


②Query を選択

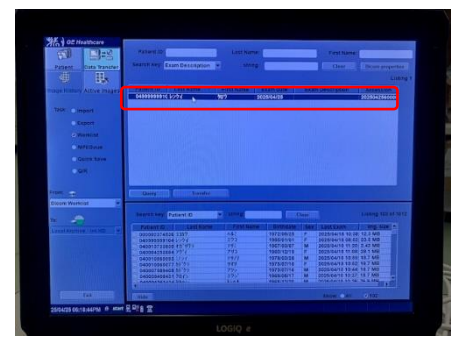

③検査したい受診者名を選択し、  
キーボードのEnterを2回押す



④キーボードのフリーズを  
押すと検査開始となる

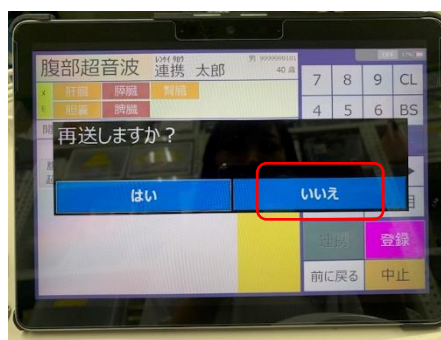


⑤検査終了後に「いいえ」を選択して初期画面へ戻る




<本体から USB へデータを取り込む (GE) >




①USB を差し込む

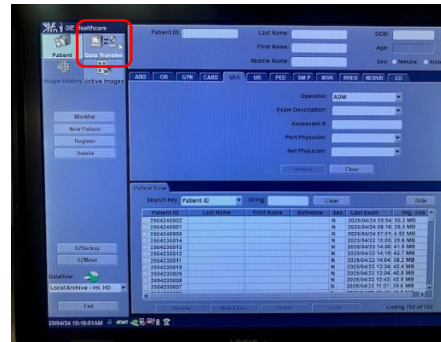

②Data Transfer を選択

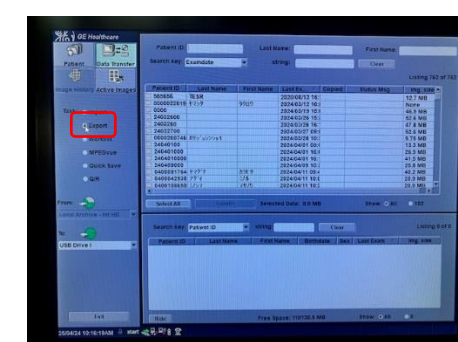


③Export を選択

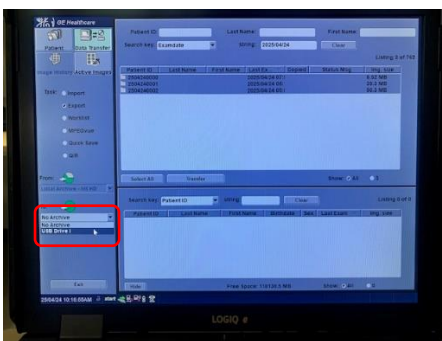


④保存先が USB Drive I になって  
いることを確認する

※USB Drive J だと保存ができません

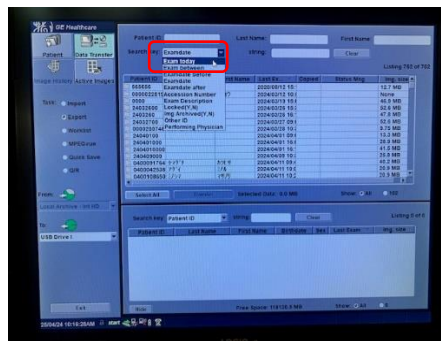


⑤Search key を Exam today にする

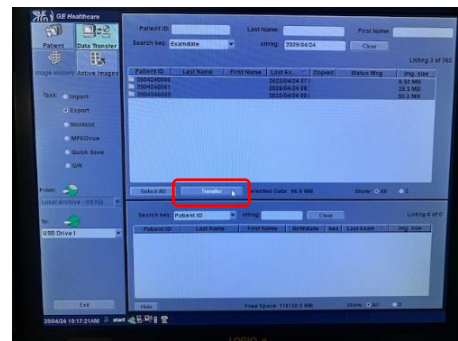


⑥転送したいデータを選択して  
Transfer を押す


<受診者情報取得 (Viamo) > 2 ページ目の①～⑥の後

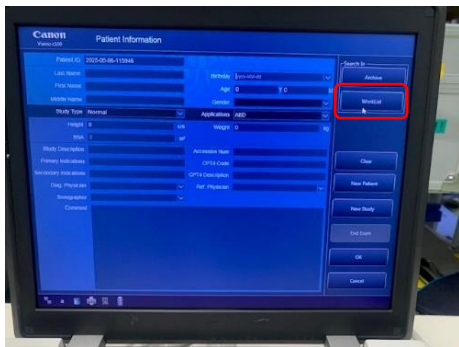


①Workrist を選択

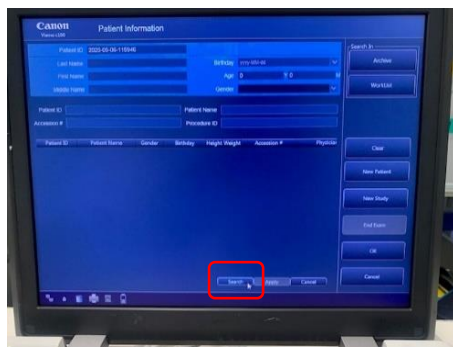


②Search を選択

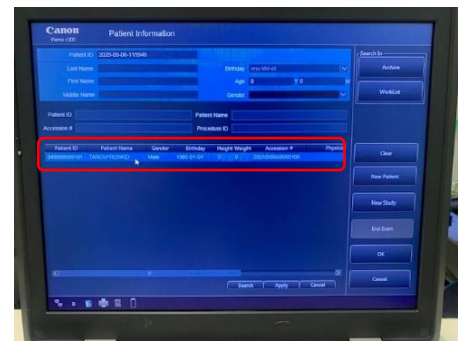

③検査したい受診者名を選択

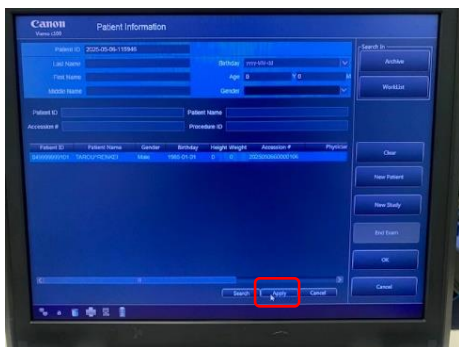


④Apply を選択

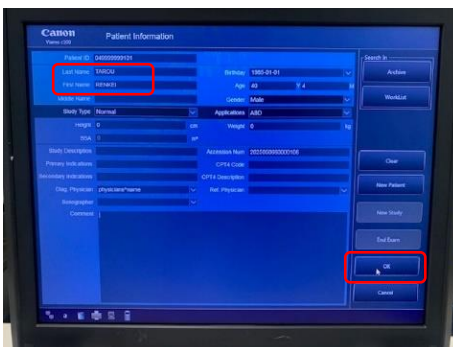


⑤受診者名が合っているか確認し OK を押す

<本体から USB ヘータを取り込む (Viamo) >

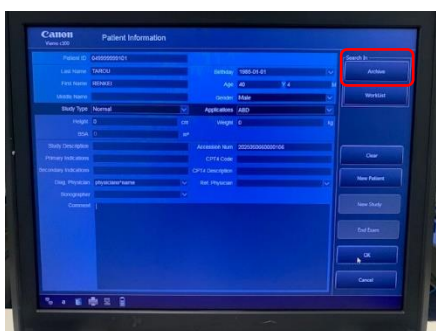


①メニュー画面から Archive を選択

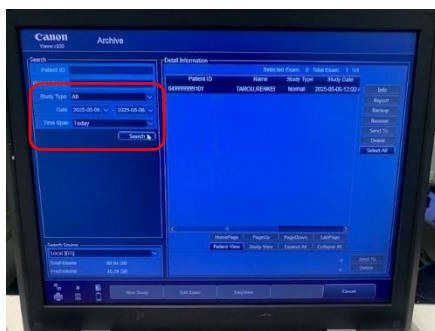

②Date を健診日にして Search を選択



③受診者を選択し Send To を押す

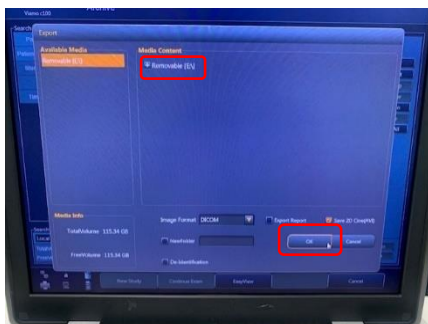

④Media Content が Removable [E:/] なることを確認し OK を押す